

FLOW 2

Signale - Statusmeldungen

Signale am Motorgehäuse

	Bedeutung	Aktion
Blaues Dauerlicht	Der Treppenlift ist eingeschaltet.	---
Kein Licht	Der Treppenlift ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Treppenlift mithilfe der elektronischen Senkvorrichtung ein.

Signale an der Armlehnen-Bedieneinheit

Signal	Bedeutung	Aktion
Grünes Dauerlicht	Der Joystick wurde betätigt und der Treppenlift bewegt sich oder wird sich bewegen.	---
Rotes Dauerlicht	Störung.	Schalten Sie den Treppenlift aus und wieder ein. Falls der Treppenlift nicht reagiert, wenden Sie sich an Ihren Händler.
Konstantes rotes Licht + schnelle Signaltöne in Intervallen	Sicherheitsgurt nicht geschlossen.	Tritt die Situation ein, während sich der Treppenlift bewegt, fahren Sie ihn mit der elektronischen Senkvorrichtung herunter.
Rotes Blinklicht	Der Treppenlift ist ausgeschaltet.	Legen Sie den Sicherheitsgurt an.
Rotes Blinklicht + schnelle Signaltöne in Intervallen	Der Sitzlift ist auf ein Hindernis getroffen und ist stehengeblieben.	Schalten Sie den Treppenlift mithilfe der elektronischen Senkvorrichtung ein.
Innerhalb von 3 Sekunden 2-Ton-Signale, die sich alle 13 Sekunden wiederholen	Der Treppenlift befindet sich nicht an einem Ladepunkt.	Bewegen Sie den Treppenlift in die Gegenrichtung zu einer Parkposition. Bevor Sie den Treppenlift verwenden, stellen Sie sicher, dass die Treppe frei von Hindernissen ist.
Oranges Dauerlicht	Funkfrequenzstörung durch ein Fremdgerät.	Bewegen Sie den Treppenlift zu einer Ladeposition.

Signale an der Ruf-/Parkstation

Signal	Bedeutung	Aktion
Grünes Dauerlicht + langsame Signaltöne (Treppenlift)	Der Treppenlift wurde zu einem früheren Zeitpunkt von einer anderen Bedieneinheit gesteuert.	Warten Sie; der Treppenlift wird sich in 10 Sekunden bewegen.
Rotes Blinklicht	Der Treppenlift wurde bereits von einer anderen Bedieneinheit gesteuert.	---