

FLOW X

Signale - Statusmeldungen - Fehlermeldungen

01a | Signale am Motorgehäuse

Signal	Bedeutung	Maßnahme
Blaues Dauerlicht	Der Treppenlift ist eingeschaltet.	-
Dauerhaft blau leuchtend - leicht gedimmt	Der Treppenlift befindet sich an einer Parkstation im Schlafmodus	-
Kein Licht	Der Treppenlift befindet sich im Schlafmodus, jedoch nicht an einer Parkstation	Bewegen Sie den Treppenlift zu einer Parkstation
Kein Licht	Der Treppenlift ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Treppenlift mithilfe des Hauptschalters ein

01b | Signaltöne vom Motorgehäuse

Signal	Beschreibung
Ankunftssignalton	Doppelter Piepton
Notabsenkungssignalton	Doppelter Piepton, jede Sekunde
Anfahrssignalton	Doppelter Piepton
Warnsignalton	Schnelle Signaltöne in Intervallen
Fehlersignalton	Intermittierende Pieptöne (von 2800 Hz bis 7 KHz)

02 | Signale an Joystick-Bedieneinheit

02a | Signale bei der Bedienung des Treppenliftes

Signal	Bedeutung	Maßnahme
Grünes Dauerlicht	Der Joystick wurde betätigt und der Treppenlift bewegt sich.	-
Dauerhaft grün leuchtend + Anfahrtsignalton	Der Joystick wurde betätigt und der Treppenlift fährt langsam an	-
Blinkendes grünes Licht für 5 Sekunden +Ankunftssignalton	Der Treppenlift ist am Haltepunkt angekommen	Lassen Sie den Joystick los und klappen Sie ihn nach unten
Blinkendes grünes Licht für 5 Sekunden	Der Treppenlift bewegt sich nicht: Der Joystick wird in Richtung des Haltepunkts gedrückt, an dem sich der Treppenlift bereits befindet (Schienenende)	Halten Sie den Joystick in die entgegengesetzte Richtung gedrückt, um den Lift zu starten
Grünes Blinklicht und Warnton beim Einklappen	Die Sitzfläche oder Fußstütze wird ein- oder ausgeklappt	-
Dauerhaft orange leuchtend + Warnsignalton	Nicht alle Bedingungen sind erfüllt: Der Treppenlift fährt nicht an Diese Fehler können vom Benutzer behoben werden	Prüfen und erfüllen Sie alle Bedingungen: <ul style="list-style-type: none"> - Sitzfläche und Fußstütze vollständig heruntergeklappt - Armlehnen in korrekter Position verriegelt - Sicherheitsgurt angelegt - Schlüsselschalter im gesperrten Zustand Betätigen Sie den Joystick zweimal, um den Treppenlift zu starten

02a | Signale bei der Bedienung des Treppenliftes

Signal	Bedeutung	Maßnahme
Dauerhaft orange leuchtend + Warnsignalton	Die Quetsch-Schutzfunktion ist aktiviert, weil der Treppenlift auf ein Hindernis gestoßen ist und angehalten hat	Bewegen Sie den Treppenlift in die entgegengesetzte Richtung in eine Parkposition. Bevor Sie den Treppenlift verwenden, stellen Sie sicher, dass die Treppe frei von Hindernissen ist
2 Mal blinkendes orangefarbenes Licht	Steuerungseinrichtung der Begleitperson oder Not-Absenk-Taste ist aktiviert	-
Blinkendes orangefarbenes Licht + Warnsignalton	Not-Absenk-Taste aktiv, wenn eine Fehlfunktion aufgetreten ist	-
Blinkendes rotes Licht + Warnsignalton	Not-Aus-Taster ist aktiviert	Deaktivieren Sie den Not-Aus-Taster, indem Sie die Taste länger als 2 Sekunden drücken.
Dauerhaft rot leuchtend + Fehlersignalton	Defekt	Schalten Sie den Treppenlift aus und wieder ein. Falls der Treppenlift nicht reagiert, wenden Sie sich an Ihren Händler. Tritt die Situation ein, wenn sich der Treppenlift in der Mitte der Treppe befindet, fahren Sie ihn mit der Not-Absenk-Taste herunter.

02b | Signale beim Betätigen der Not-Absenk-Taste

	Bedeutung	Maßnahme
Dauerhaft grün leuchtend + Signalton für Notabsenkung	Die Not-Absenk-Taste wurde betätigt und wenn alle Voraussetzungen für die Benutzereinstellungen erfüllt sind, bewegt sich oder beginnt der Treppenlift, sich zu bewegen	-
Dauerhaft orange leuchtend + Signalton für Notabsenkung	Die Not-Absenk-Taste wurde betätigt und der Treppenlift bewegt sich oder beginnt, sich zu bewegen, während der Sitzgurt nicht angelegt ist	
Blinkendes grünes Licht für 5 Sekunden + Ankunftssignalton	Der Treppenlift ist am Haltepunkt angekommen	Lassen Sie die Not-Absenk-Taste los
Dauerhaft rot leuchtend + Fehlersignalton	Defekt	Schalten Sie den Treppenlift aus und wieder ein. Falls der Treppenlift nicht reagiert, wenden Sie sich an Ihren Anbieter
Blinkendes rotes Licht + Warnsignalton	Not-Aus-Taster ist aktiviert	Deaktivieren Sie den Not-Aus-Taster

02c | Signale beim Betätigen des Schlüsselschalters

	Bedeutung
3 Sekunden orangefarbene LED + Warnton	Aktivierung des Schlüsselschalters
3 Sekunden grüne LED + Warnton	Deaktivierung des Schlüsselschalters

03 | Signale an der Ruf / Parkstation

Signal	Bedeutung	Maßnahme
Blinkendes grünes Licht + Anfahrtsignalton (vom Treppenliftantrieb)	Die Taste an der Ruf-/ Parkstation wurde betätigt und der Treppenlift fährt langsam an	-
Blinkendes grünes Licht für 5 Sekunden +Ankunftssignalton (vom Treppenliftantrieb)	Der Treppenlift ist am Haltepunkt angekommen	Lassen Sie die Taste an der Fernbedienung los
Blinkendes orangefarbenes Licht +Warnsignalton (vom Treppenliftantrieb)	Nicht alle Bedingungen sind erfüllt: Der Treppenlift fährt nicht an.	Prüfen und erfüllen Sie alle Bedingungen: <ul style="list-style-type: none"> - Armlehnen in korrekter Position verriegelt - Sicherheitsgurt angelegt - Schlüsselschalter im gesperrten Zustand
2 Mal blinkendes orangefarbenes Licht	Joystick oder Not-Absenk-Taste ist aktiviert	-
Blinkendes orangefarbenes Licht	Der Akku der Fernbedienung ist schwach	Tauschen Sie die Batterien aus
Blinkendes rotes Licht + Fehlersignalton	Defekt	Schalten Sie den Treppenlift aus und wieder ein. Falls der Treppenlift nicht reagiert, wenden Sie sich an Ihren Händler.
Blinkendes rotes Licht +Warnsignalton	Not-Aus-Taster ist aktiviert	Deaktivieren Sie den Not-Aus-Taster