

HOMEGLIDE

Signale an der Armlehnen Bedieneinheit

Signal	Bedeutung	Aktion
Schnelle Signaltöne in Intervallen	Der Treppenlift ist auf ein Hindernis getroffen und ist stehengeblieben.	Bewegen Sie den Treppenlift in die Gegenrichtung zu einer Parkposition. Bevor Sie den Treppenlift verwenden, stellen Sie sicher, dass die Treppe frei von Hindernissen ist.
	Die Batterien sind schwach.	Bewegen Sie den Treppenlift nach unten in eine Parkposition. Bevor Sie den Treppenlift benutzen, vergewissern Sie sich, dass die Batterien mindestens ein paar Stunden lang aufgeladen sind.
Innerhalb von 3 Sekunden 2-Ton-Signale, die sich alle 10 Sekunden wiederholen	Der Treppenlift befindet sich nicht an einer Ladestation.	Bewegen Sie den Treppenlift zu einer Ladeposition.
2 Sekunden lang 1 Signalton	Der Treppenlift verfährt.	-
2 Sekunden lang 3 Signaltöne	Der Treppenlift erreicht einen Stockwerksflur.	-
0,5 Sekunden lang 1 Signalton, der jede Sekunde wiederholt wird + 3-Ton-Endsignal	Der automatische Drehsitz ist in Bewegung.	-
0,5 Sekunden lang 1 Signalton, der jede Sekunde wiederholt wird	Die Scharnierschiene ist in Bewegung.	-